

# メディコム 滅菌ロール



オートクレーブ/EOガス用インジケーター付き

ボックス入り



## メディコム 滅菌ロールの特長

- 自由な長さにカットできる滅菌ロールです。
- 被滅菌物の大きさに合わせて、フレキシブルにご使用できます。
- スムーズに開封でき、紙剥けやフィルム裂けがなく安全で衛生的です。
- ボックス入りタイプなので、専用ディスペンサーが不要です。
- ISO11140・Class1のプロセスインジケーターを採用、滅菌条件を通過したか否かの確認がしやすくなりました。
- 滅菌中に被滅菌物に印刷インクが移らないよう、インクを強化しました。
- 水性インクの使用により、環境への配慮も行っております。
- 片面が透明着色フィルムのため、内容物の確認がしやすく、シール状況が一目でわかります。 ※封印用のシーラーが必要です。

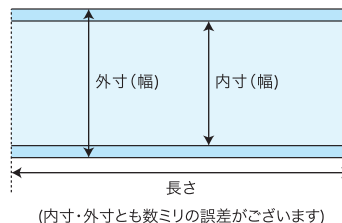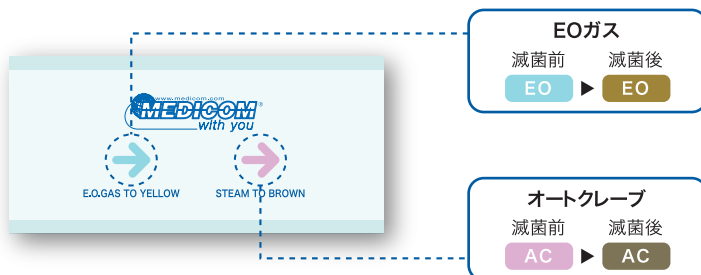

※印刷の為、実際の色とは多少異なることがあります。  
 ※インジケーターは化学的インジケーターであり、あくまでも被滅菌物が滅菌工程にさらされたか否かを区別するもので、被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。

オートクレーブ・EOガス両用

品番	外寸(幅×長さ)	内寸(幅)	入り数	JANコード
8862-9510	幅50mm×長さ200m	30mm	1ケース/6ロール	4897008630836
8862-9520	幅75mm×長さ200m	55mm	1ケース/4ロール	4897008630843
8862-9530	幅100mm×長さ200m	80mm	1ケース/3ロール	4897008630850
8862-9540	幅150mm×長さ200m	130mm	1ケース/2ロール	4897008630867
8862-9550	幅200mm×長さ200m	180mm	1ケース/4ロール	4897008631772
8862-9560	幅250mm×長さ200m	230mm	1ケース/4ロール	4897008631789
8862-9570	幅300mm×長さ200m	280mm	1ケース/2ロール	4897008631796
8862-9580	幅350mm×長さ200m	330mm	1ケース/2ロール	4897008631802

### 【ご使用上の注意】

- 滅菌ロールのご使用は1回限りでお願いします。(再使用はおやめ下さい。)
- 保管の際は、水濡れに注意し、酸・アルカリ・殺菌消毒剤・直射日光・紫外線・蛍光灯・高温多湿等を避けて下さい。(滅菌紙の劣化や、インジケーターの変色等、滅菌ロールの品質を損なう恐れがあります。)
- 乾熱滅菌器ではご使用できません。
- ケミクレーブ滅菌ではご使用はできません。
- 常温で保管し、滅菌後約6ヶ月以内のご使用をおすすめします。