

ANIOSYME SYNERGY5

アニオザイム シナジーファイブ



アニオザイム シナジーファイブ
ANIOSYME SYNERGY5 は、
浸漬、超音波洗浄機、自動洗浄機などに
幅広く使える洗浄剤です。5種類もの酵素
から組成されたという世界でも希少な特長
を持ち、様々な汚れに対して優れた効果
を発揮します。

特長

- ✓ 診療器具、診療機器など、幅広い範囲にご使用できます。
- ✓ 5種類の酵素が、様々な種類の汚れに対して優れた効果を発揮します。
- ✓ 希釈タイプのため、経済的にお使いいただけます。
- ✓ 揮発性有機化合物(VOC)が含まれておらず、環境にもやさしく安全です。

主成分

非イオン性界面活性剤、アニオン性界面活性剤、金属イオン封鎖剤、安定剤、
酵素複合体、賦形剤

容量

浸漬・超音波洗浄用

- ・ 1リットルボトル
- ・ 定量ポンプ付き5リットルボトル

洗浄機用

- ・ 5リットルボトル

ご使用になる前に

- ・ 安全のため、グローブ・マスク・フェイスシールド・ガウン等を着用してください。

その他ご注意ください

- ・ 60°C以上のお湯では使用しないでください。
- ・ 5°C~35°Cの間で保管してください。
- ・ お子様の手の届かないところに保管してください。
- ・ 直射日光の当たる場所には保管しないでください。

品番：ANI2235036
入り数：1ケース/4本

EANコード：3597610251245

品番：ANI2235095
入り数：1ケース/12本

EANコード：3597610271908



使用方法

- 1 0.05%~0.5%に希釈してお使いください。
汚れの度合や洗浄の方法に応じて、使用時間・温度・希釈濃度を調整してください。



- 2 汚れがひどい場合は、ブラッシングしてください。



- 3 その後、完全に洗い流してください。

