

# ユニットや椅子をスプレー泡で拭き取り除菌 サーファセーフ プレミアム SURFA'SAFE Premium



イルガサンDP-300  
(トリクロサン)  
FREE

様々な  
ウイルス・細菌に  
高い除菌効果を  
発揮



## 用途

診療器具やユニット、椅子、壁など設備表面の  
洗浄・除菌

### エタノールフリー

ゴム・プラスチック・革・人工  
皮革にも使用可能です

### 泡タイプ

垂れ落ちにくい高密度の泡です

無香料

無着色

アレルギーフリー

## 主成分

- ・ DDAC-B  
(塩化ジデシルジメチルアンモニウム+非イオン界面活性剤)
- ・ 金属イオン封鎖剤
- ・ 賦形剤


## 清拭による洗浄と除菌が一度で完了



本品を直接スプレー、又は不織布  
に噴霧します。



エリア全体が除菌されるよう不織  
布等でよく清拭します。

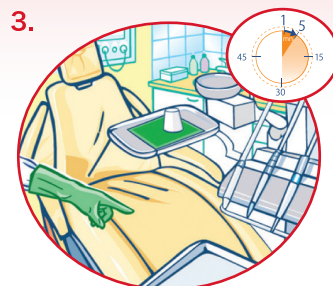

そのまま所定の時間置いてください。  
(時間は対象となる菌によって異な  
ります)※粘膜に直接触れる可能性のあ  
るものを清拭した場合は、ご使用後に洗  
い流してください。

●すべての菌を除菌するわけではありません。●安全のため、ご使用の際はグローブを着用ください。●5°C~35°Cの間で保管してください。●お子様の手の届かないところに保管してください。●直射日光の当たる場所には保管しないでください。

品番	内容量	入り数	EANコード(本体)	EANコード(外箱)
ANI2419544	750ミリリットル	12本/ケース	3597610421716	3597610429248