

イルガサンDP-300
(トリクロサン)
FREE

バーやリーマーの滅菌前洗浄に スペシャル ロタティブ Special Rotative

様々な
ウイルス・細菌に
高い除菌効果を
発揮



用途

バーやリーマー、根管治療器具などの浸漬洗浄
汚れが激しい場合の超音波洗浄

中性

材質を選ばず使用可能

(ニッケル・チタニウム・タングステンカーバイド、
アルミニウム等にも使用可)

アルデヒドフリー

原液タイプ

そのまま使えて簡単

浸漬の際は



十分な深さがあり、すすぎもしやすい
「ソーキングカップ」のご使用が
オススメです。

◀ ANI0404050 高さ8×Φ上9×Φ下8.6cm
参考医院価格：¥2,940/個


主成分

- ・ DDAC-B
(炭酸ジデシルジメチルアンモニウム+非イオン界面活性剤)
- ・ 金属イオン封鎖剤
- ・ 香料 ・ 着色剤 ・ 賦形剤

一次洗浄と除菌が1ステップで完了、優れた除菌効果を発揮




本品をソーキングカップなどの
洗浄容器に注ぎます。薄めず原
液のままご使用ください。

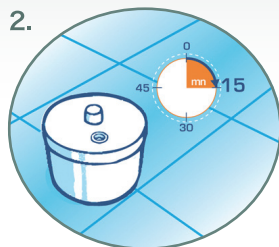

器具を完全に液中に沈めます。
所定の時間、そのまま置いてくだ
さい。(浸漬時間は対象となる菌
によって異なります)



器具を取り出し、流水で全体を
よくすすいでください。

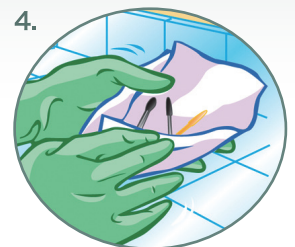

器具を乾燥させて、その後、滅菌
してください。

●すべての菌を除菌するわけではありません。●安全のため、ご使用の際はグローブを着用ください。●洗浄液は連続して使用することが可能ですが、1日に少なくとも1度は交換を行ってください。●5℃～35℃の間で保管してください。●お子様の手の届かないところに保管してください。●直射日光の当たる場所には保管しないでください。

| 品番 | 内容量 | 入り数 | EANコード(本体) | EANコード(外箱) |
|------------|-------|--------|---------------|---------------|
| DEN2480047 | 5リットル | 1本/ケース | 3597610428470 | 3597610428470 |
| DEN2480062 | 2リットル | 1本/ケース | 3597610428487 | 3597610428487 |