

イルガサンDP-300
(トリクロサン)
FREE

1日の終わりにシステムを洗浄
アスピレーション エイ エフ
Aspiration AF+



様々な
ウイルス・細菌に
高い除菌効果を
発揮



用途

吸引システムやスピットンの洗浄・除菌
残存する歯垢等の洗浄・防臭

泡立たないため、すすぎが簡単

中性

材質を選ばず使用可能

アルデヒドフリー

50倍濃縮タイプ

トータルでの使用量が経済的

主成分

- ・アミノプロピルドデシルプロパンジアミン
- ・非イオン界面活性剤
- ・金属イオン封鎖剤 ・着色剤 ・賦形剤


----- 希釈とシステムへの吸引の際は -----



希釈とシステムへの吸引が1つでできる
「ASP システムタンク」のご使用が
オススメです。

◀DEN4240500 縦14.8×横18×高さ21.5cm
参考医院価格：¥6,900/個

バイオフィルムを強力除去、洗浄と除菌が1ステップで完了

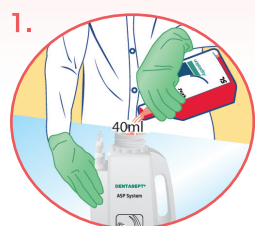


1. 本品を2%に希釈します。
(水1リットルの場合、原液
20ミリリットル)
5リットルポットはポンプ1押
しが20ミリリットルです。



2. 希釈液を静かに振って混ぜ
てください。



3. 吸引システムに通します。

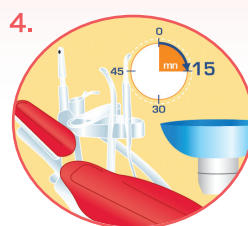

4. 所定の時間、そのまま置いて
ください。(時間は対象とな
る菌によって異なります)
システム内に一晩置いていた
だと、より効果的です。



5. システムのご使用前に、1リッ
トル以上の水で洗い流して
ください。

●すべての菌を除菌するわけではありません。●安全のため、ご使用の際はグローブを着用ください。●1日に1回は洗浄を行ってください。●5°C~35°Cの間で保管してください。●お子様の手の届かないところに保管してください。●直射日光の当たる場所には保管しないでください。

品番	内容量	入り数	EANコード(本体)	EANコード(外箱)
DEN2536431	5リットル	2本/ケース	3597610450624	3597610450624
DEN2536137	1リットル	3本/ケース	3597610450594	3597610450594